

Revizyon Tarihi	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
DMC.TL.007	01.01.2016			1 / 1

Amaç:SLT Lazer cihazının hatasız kullanımının ve bakımının sağlanması.

Kullanımı:

- 1.Cihaz tablosunun alt kısmında bulunan anahtar sağa doğru çevrilir, anahtarın yan tarafındaki turuncu butona basılarak cihaz çalıştırılır.
- 2.Hastanın başı çeneliğe yerleştirilir ve kemer ile cihaza sabitlenir.
- 3.İşlem için hazırlanmış Latina SLT Gonio Laser lensin içerisine jel konularak hastanın gözüne lens takılır.
- 4.Daha sonra cihazın sağ ve sol tarafında bulunan ayar kolundan güç ayarı yapılır.
- 5.Mikroskop üzerinde bulunan büyütmelemlerden hangisi tercih edilecekse ayarlaması yapılır.
- 6.Cihaz üzerinde bulunan joy-stick yardımı ile aşağı-yukarı,sağa-sola hareket ettirilerek gözde işlem yapılmak istenilen bölge tespit edilir.
- 7.Tespit işleminden sonra joy-stick üzerindeki butona basılarak lazer atışı yapılır.Bu işlem gözün yapısına ve tedavinin gerektirdiği kadar tekrarlanır.
- 8.Tedavi tamamlandıktan sonra göze takılan lens çıkarılır.
- 9.Cihazı kapatmak için ilk önce turuncu butona basılır ve anahtar sol tarafa çevrilir.

Bakımı:

- 1.Sorumlusu tarafından her sabah 1 defa temizlenir.
- 2.Anlaşmalı bakım servisi yada firması tarafından rutin kontrolleri yaptırılır.
- 3.Olağan dışı durumlarda anlaşmalı bakım servisi çağırılır.

<i>Hazırlayan</i> Kalite Yönetim Ekibi	<i>Kontrol Eden</i> Kalite Yönetim Direktörü	<i>Onaylayan</i> Mesul Müdür
---	---	---------------------------------