

Doküman Kodu

Yayın Tarihi

Revizyon  
No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

SSH.TL.005

01.01.2016

1

20.04.2018

1 / 1

**Amaç:** Büyük Otoklav cihazının hatasız kullanımını ve bakımını sağlamak

**Sorumlu:** Ameliyathane Personeli

## KULLANIMI:

1. Cihaz açılır kapak contası yağlanır yeterli ısıya ve sistem hazır uyarısı çıkana kadar beklenir.
2. Malzemeler içine konur ve cihazın kapağı ekranın üstünde bulunan kapat butonu ile cihaz kapağı kapatılır.
3. Uygun program seçilir sterilizasyon işlemi başlatılır.
4. İşlem bittiğinde cihaz ses uyarısı ve yük steril uyarısı verir.
5. Cihazın üzerinde bulunan kapak aç butonu ile otoklavın kapağı açılır koruyucu ekipman giyilerek otoklavdan malzemeler çıkartılır.
6. Malzemeler raflara yerleştirilir.

## BAKIMI:

- 1-Sorumlusu tarafından her sabah 1 defa temizlenir.
- 2-Anlaşmalı bakım servisi ya da firması tarafından rutin kontrolleri yapılır.
- 3-Olağan dışı durumlarda anlaşmalı bakım servisi çağrılır.

*Hazırlayan*

Ameliyathane Personeli

*Kontrol Eden*

Kalite Yönetim Direktörü

*Onaylayan*

Mesul Müdür